



ΕΜΒΟΕΣ

(βουητό των αυτιών)

Νέα Θεραπευτική Μέθοδος
(Με τη συνδρομή του θεράποντα ιατρού σας)

Τί είναι οι εμβοές;

Οι **εμβοές** είναι ο ιατρικός όρος για το **βουητό** που ακούνε πολλοί άνθρωποι στο ένα, στα δύο αυτιά ή μέσα στο κεφάλι. **Δεν είναι νόσος** αλλά ένα απλό **σύμπτωμα**. Αυτοί οι ήχοι δεν προέρχονται από το περιβάλλον ενώ ακούγονται διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο που τους βιώνει. Πρόκειται για **ποικιλόμορφους ήχους** με διαφορές στην ένταση και τη συχνότητα. Έτσι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει 'το δικό του' βουητό.

Οι λόγοι που προκαλούν εμβοές είναι ποικίλοι, όπως η έκθεση σε θόρυβο, φλεγμονές των ωτών, το άγχος και πολλά άλλα.


Αποτελεί μια κατά κανόνα **δύσκολη κατάσταση** στην οποία τα άτομα ταλαιπωρούνται και αντιμετωπίζουν δυσκολία να ηρεμήσουν, να συγκεντρωθούν ή να χαλαρώσουν. Η κατάσταση **επιδεινώνεται σε ήσυχο** περιβάλλον και στον **ύπνο**.

Αντιμετωπίζετε συμπτώματα όπως:

Βούισμα στο ένα ή και στα δύο αυτιά (σφύριγμα, θόρυβο κλπ);

Ελαφριά μείωση της καθαρότητας των ήχων που ακούτε;

Αδυναμία συγκέντρωσης ή χαλάρωσης λόγω βουητού;

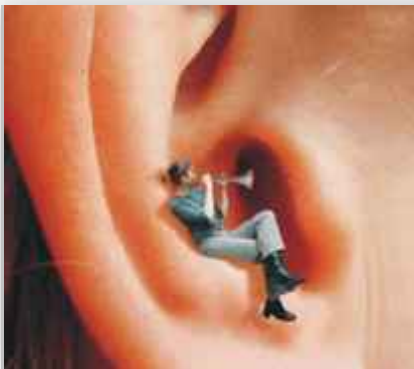

Αφού προηγηθεί ο έλεγχος του αιτιοπαθολογικού μηχανισμού από τον ΩΡΛ ιατρό και η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή που θα σας προταθεί αποτύχει, η τεχνολογία **laser προσφέρει** μια ακόμα **δυνατότητα**.

Η μέθοδος έχει **αποδειχθεί** από μελέτες ότι βοηθάει **στην πλήρη υποχώρηση** των εμβοών σε ποσοστό 26 % και στη **μείωσή** τους σε ποσοστό 58 %.

Νέα Επανάστατική Μέθοδος

Διεθνείς ιατρικές έρευνες και μελέτες (βιβλιογραφία διαθέσιμη) κατέδειξαν τη **θετική επίδραση** δέσμης laser όταν αυτή εφαρμόζεται με συγκεκριμένη συχνότητα σε περιοχές των αυτιών, σε άτομα που παρουσιάζουν **εμβοές**, νόσο του **Meniere** (ίλιγγος), οξεία μείωση της ακοής και ακουστική παραμόρφωση.



Η δράση της δέσμης διαπερνά τα βαθύτερα υποδόρια στρώματα και δρά ως **θεραπευτική** βιο-διέγερση στο συνδετικό ιστό. Αυτό οδηγεί σε ταχεία **αναγέννηση** των ακουστικών **κυττάρων** (που δεν έχουν καταστραφεί αλλά υπολειπوغούν) και **διέγερση** του **ανοσοποιητικού συστήματος**.

Μέθοδος SoftLaser Tinnitool



Η Ελβετική τεχνολογία SoftLaser Tinnitool επιτρέπει στα άτομα να κάνουν χρήση της θεραπευτικής μεθόδου στο σπίτι, στο γραφείο ή σε οποιοδήποτε χώρο τους εξυπηρετεί. Η συχνότητα χρήσης **καθορίζεται** από τον ΩΡΛ ιατρό και **επανεξετάζεται**, με βάση τον ακόλουθο κανόνα:

| | |
|--|---|
| Πίεση/ πληρότητα αυτιών : | 15 λεπτά , μια φορά την ημέρα, για τουλάχιστον 3 εβδομάδες |
| Παραμόρφωση ακοής και/ ή απότομη μείωση ακοής: | 15 λεπτά , μια φορά την ημέρα, για τουλάχιστον 4 εβδομάδες |
| Ιλιγγος: | 20 λεπτά , μια φορά την ημέρα, για τουλάχιστον 4 εβδομάδες |
| Εξασθένηση ακοής από εμβοές: | 20 λεπτά , μια φορά την ημέρα, για τουλάχιστον 8 εβδομάδες |
| Εμβοές: | 20 λεπτά , μια φορά την ημέρα, για τουλάχιστον 10 εβδομάδες |





Ζώντας καλύτερα

Η ζωή των ατόμων με εμβοές **μπορεί να βελτιωθεί** με τις σύγχρονες μεθόδους **θεραπείας** και **ανακούφισης**. Στην **earcare** θα βρείτε εκτός από τη μέθοδο SoftLaser Tinnitool, μια **μεγάλη συλλογή** από βοηθήματα **ανακούφισης** και **χαλάρωσης** για καλύτερη καθημερινή **ζωή** και πιο εύκολο **ύπνο**.



Soft Laser
Tinnitool



CD εξειδικευμένων ήχων για καλύτερο **ύπνο** ειδικά για τις δικές σας εμβοές



CD εξειδικευμένων ήχων για **χαλάρωση** ειδικά για τις δικές σας εμβοές



Συσκευή παραγωγής ήχων ανακούφισης

Συμβουλευτείτε τον ΩΡΛ ιατρό σας ή καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες :

Συμβουλευτική γραμμή
επικοινωνίας **χωρίς χρέωση**

800-11-800.700



earcare

Βερανζέρου 22

Ομόνοια - Αθήνα

τηλ.κέντρο 210-5220.747

www.akoh.gr